

ESPAÑOL (AMERICA LATINA)

Andafacil Silla para Baño Extra Resistente



Andafacil[®]

www.andafacil.com

Andafacil Silla para Baño Extra Resistente

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de usar la silla de baño, asegúrese de que estén instalados los tornillos correctos para fijarla en su lugar.
- No exceda la capacidad de carga máxima (440 libras).
- No te pares sobre él.

DESCRIPCIÓN SILLA DE BAÑO

El tratamiento superficial de la silla de ducha está anodizado para mejorar la resistencia a la corrosión y la abrasión y mejorar la dureza. La placa del asiento y el respaldo son de tablero moldeado por soplado, protección del medio ambiente, fácil de limpiar y resistente al agua. Los reposabrazos están hechos de espuma ecológica, impermeable, antideslizante y cómoda al tacto.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: aleación de aluminio
Respaldo y asiento: Plástico
Reposabrazos: Espuma
Alfombrilla para pies: Goma


PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de que el montaje esté en su lugar y que los tornillos no estén flojos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras utiliza la silla de baño, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que los tornillos estén instalados para fijarlo en su lugar.
3. No se suba a la silla.
4. Colóquelo en un terreno plano

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

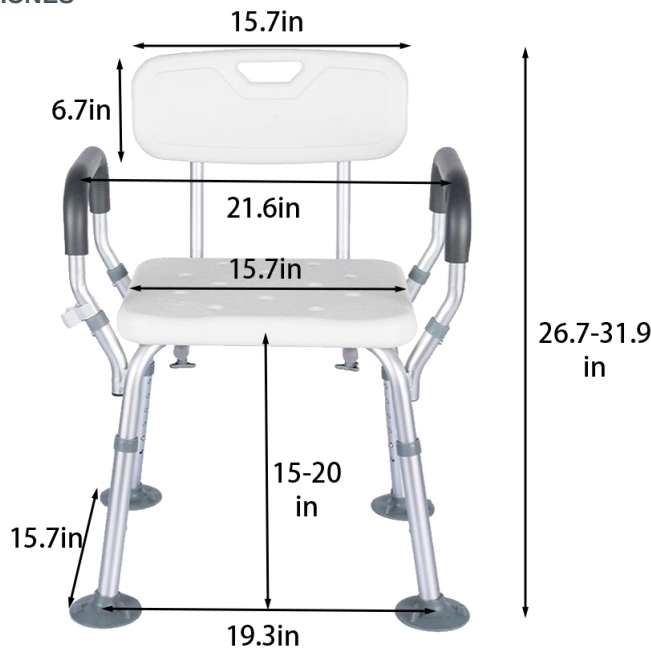

COMPONENTE



1. Pasamanos cómodo
2. Respaldo
3. Alfombrilla de succión para pies
4. Pierna ajustable
5. Soporte para cabezal de ducha

Tamaño: 19,3*15,7*26,7-31,9 pulgadas
Ancho: 15,7 pulgadas
Respaldo: 15,7*6,7 pulgadas
Altura total: 26,7-31,9 pulgadas
Tamaño del asiento: 15,7*13 pulgadas
Asiento al suelo: 15-20 pulgadas

Máx. Carga: 440 libras
Peso : 7,1

Andafacil Silla para Baño Extra Resistente

La silla de baño requiere montaje antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque la estructura de la silla de baño y sus accesorios.




MONTAR LA SILLA DE BAÑO-1

Colocación adecuada de juntas.


✓Cóncavo hacia abajo ✗Cóncavo hacia arriba



MONTAR LA SILLA DE BAÑO-2

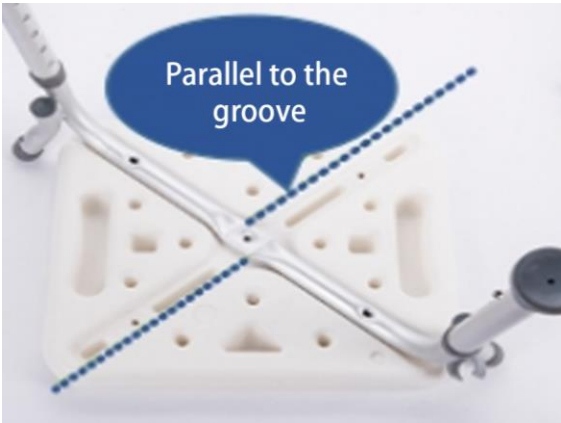

La placa del asiento se coloca boca abajo y la superficie de presión del tubo de aluminio es paralela a la ranura.

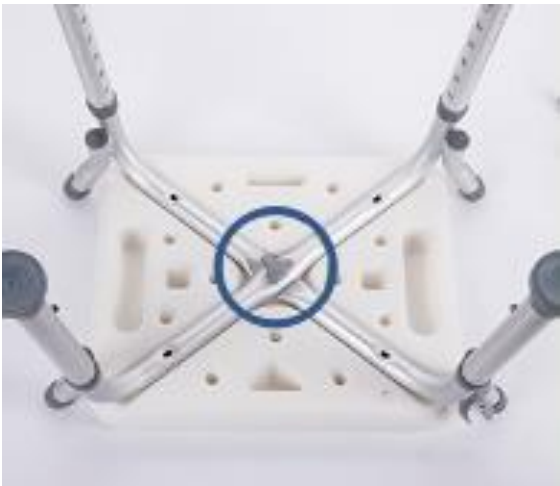

Coloque el otro en la posición del orificio correspondiente, coloque la junta en el orificio del medio, bloquee el tornillo corto e instale la almohadilla.



Coloque los dos tubos del respaldo en forma de L en las posiciones correspondientes, coloque las juntas y bloquee los tornillos largos.



Andafacil[®]
www.andafacil.com

Andafacil Silla para Baño Extra Resistente



Coloque la silla, instale el respaldo, bloquee los tornillos cortos, inserte el pasamanos en ambos lados y la instalación estará completa.



Abra la película protectora del cojín de EVA y péguela en el orificio cerca de la placa del asiento.

MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna pieza de la silla de baño está suelta o no está segura, deje de usarla y llévela a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección. A continuación se muestra el cronograma de mantenimiento:

PERIODICAMENTE

- Verifique que todos los pernos estén seguros.
- Compruebe si el marco está roto, doblado o deformado.

LIMPIEZA

La silla de baño se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas, el asiento o la ALFOMBRA PARA LOS PIES, ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIA!

1. Debe estar acompañado cuando utilice la silla de baño por primera vez.
2. No se pare ni pise el marco de la silla.
5. No apoye la espalda en el pasamanos para evitar que el centro de gravedad cambie y se vuelque.
6. No subas.
8. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar la silla de baño.
9. Siempre revise los tornillos de sujeción y las soldaduras de todos los marcos. Si están flojos llévalos a una estación de servicio.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrutes de tu Silla de Baño Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar www.andafacil.com/review



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.