

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

Andadera Vertical Ligera Andafacil



Andadera Vertical Ligera Andafacil Manual de Usuario

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, compruebe visualmente la integridad del dispositivo. En caso de que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el distribuidor donde lo adquirió. No asumimos ninguna responsabilidad por el mal uso del dispositivo.

DESCRIPCIÓN CAMINANTE

El andador vertical presenta un diseño plegable compacto, un marco estable de aluminio y un reposabrazos totalmente ajustable, destinado a ayudar a los usuarios a mantenerse erguidos y mirar hacia adelante con un mejor soporte.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: Aluminio
Ruedas: neumático de PVC
Pasamanos: Pasamanos texturizados antideslizantes
Asiento: Cojín de cuero negro

PREPARANDO PARA USAR

La elección del tipo de ayuda y de las configuraciones necesarias para su uso debe ser realizada por personal médico y técnico cualificado, en función de la patología y condiciones del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad al utilizar el andador vertical, debe cumplir con la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Compruebe que todos los tornillos estén apretados antes de su uso.
3. Compruebe si el botón de ajuste de altura está seguro.
4. Asegúrese de que su andador esté en su lugar. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador.
5. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
6. Los frenos deben estar en posición bloqueada antes de sentarse en el asiento.
7. Los frenos se utilizan para evitar que las ruedas rueden. Sin embargo, si alguien lo empuja, es posible que no impida que el andador se mueva.
8. N O empuje su andador mientras está sentado. Walker lo hizo a propósito.
9. N O utilice un andador para retroceder, bajar pendientes, subir escaleras, bordillos o cruzar obstáculos grandes. Puede haber un riesgo grave de caída o lesión.
10. N O utilice asientos para transportar personas u objetos grandes.
11. N O se siente en su asiento cuando el andador esté inclinado.
12. N O empuje el andador cuando el freno esté puesto.
13. N O ponga sus manos en el plegado del andador para evitar quedar atrapado.
14. N O se permita caer sobre el asiento del andador, sino siempre siéntese lentamente en el asiento de manera controlada.

COMPONENTE



1. Soporte para brazo
2. Portavasos
3. Agarre
4. Soporte para muletas
5. Marco de aluminio
- Rueda direccional de 6, 8 pulgadas
7. Freno de mano
8. Cable de freno
9. Espalda de esponja de espuma
10. Cojín de cuero impermeable
11. Bolsa de compras de tela Oxford
- 12, 8 pulgadas rueda universal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del andador vertical	53.5 CM
lateral del andador vertical	67 CM
Altura total máxima	107 CM
Altura total mínima	49 CM
Ancho del asiento	44 CM
Ancho entre las manijas	62.5 CM
Altura del asiento respecto al suelo	88 CM
	80 CM
Altura del respaldo	121 CM
Altura del mango	38.1 CM
Altura del soporte del brazo	136.2 KG
Máx. peso del usuario	12.3 KG
peso ocho	38.1 CM
Rueda delantera	15.2 CM
rueda de oreja R	

Andadera Vertical Ligera Andafacil Manual de Usuario

El andador requiere montaje antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque el andador y sus accesorios.
2. Abra el soporte triangular, coloque las ruedas y bloquee los tornillos.



3. Instale el soporte del brazo y el mango y alinee los orificios
4. Instale el freno de mano y ajústelo a la posición de ajuste, bloquéelo.



5. Instale el respaldo. Los agujeros están alineados.
6. La instalación está completa.



Andadera Vertical Ligera Andafacil Manual de Usuario

¿CÓMO AJUSTAR la ALTURA?

Altura del andador: Hay un botón de ajuste en cada tubo, que se puede presionar cuando se alcanza la altura deseada.

Altura del soporte del brazo: Gire el tornillo y sáquelo, ajústelo a la altura correcta y bloquee la posición del orificio.



PLEGABLE EL VERTICAL CAMINANTE


Para plegar un andador vertical, simplemente levante la barra negra debajo del cojín del asiento.



OPERANDO EL MANO FRENO

Freno de mano: Mantenga presionado el freno de mano para reducir la velocidad o detener el andador.

Frenos fijos: tire de los frenos hacia afuera hasta que hagan "clic" para bloquear el andador en posición para bloquear la rueda trasera.

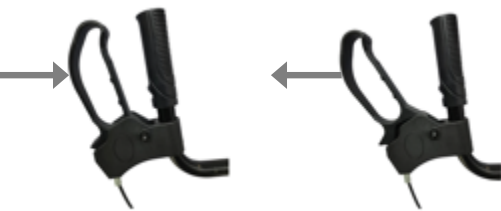

MANTENIMIENTO

Con el tiempo, los cables de freno pueden estirarse y, si no se pueden realizar más ajustes, se deben reemplazar. Busque la ayuda de su proveedor a la hora de sustituir los cables de freno. Se debe comprobar que las ruedas estén seguras cada vez antes de utilizar el andador. Además, verifique que los frenos funcionen correctamente y que las manijas y perillas estén seguras. Si alguna parte del andador parece floja o insegura, suspenda su uso hasta que sea inspeccionada por un distribuidor autorizado.

A continuación, se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Checar que los frenos funcionen de manera adecuada.
- Checar que los tornillos estén ajustados

PERIODICAMENTE

- Checar las llantas
- Checar que todas las piezas estén ajustadas.

ANUAL

- Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

Su andador se puede limpiar con un paño o esponja húmedo y agua tibia y jabón. Si es necesario, se pueden utilizar limpiadores de superficies antibacterianos domésticos. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las empuñaduras o en el asiento, lo que podría dejarlos resbaladizos durante su uso. No utilice estropajos ni raspadores, ya que esto puede dañar los revestimientos de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Límite máximo de trabajo 136 KG.
2. No se pare sobre el producto
3. Asegúrese de que ambos brazos estén ajustados a la misma altura.
4. Consulte a un profesional sanitario capacitado o a un distribuidor sanitario independiente aprobado para ajustar la altura de este producto.
5. Mantener una distancia de seguridad entre peatones y otros peatones u objetos.
6. Algunas piezas pueden causar lesiones o daños cuando entran en contacto con otros objetos.
7. No intente cambiar las ruedas o ruedas de tu bicicleta. Si están defectuosos o necesitan ser reemplazados, comuníquese con un técnico autorizado.
8. Asegúrese de que el andador esté completamente abierto (las barras plegables de ambos lados estén rectas) antes de usarlo.
9. Al plegar, mantenga los dedos alejados de la barra de plegado.
10. Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de usarlos.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su andador Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar www.andafacil.com/calificar



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.