

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

Andadera con Ruedas y Asiento Andafacil



MANUAL

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, compruebe visualmente la integridad del dispositivo. En caso de que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el distribuidor donde lo adquirió. No asumimos ninguna responsabilidad por el mal uso del dispositivo.

DESCRIPCIÓN ANDADOR

El Walker presenta un diseño plegable compacto, un marco estable de aluminio y pasamanos totalmente ajustables diseñados para ayudar a los usuarios a tener más movimiento al aire libre para hacer ejercicio y ocio.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: Aluminio
Ruedas: Neumático macizo
Pasamanos: Pasamanos texturizados antideslizantes
Asiento: Cojín de cuero negro

PREPARANDO PARA USAR

La elección del tipo de ayuda y de las configuraciones necesarias para su uso debe ser realizada por personal médico y técnico cualificado, en función de la patología y condiciones del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad al utilizar el andador, debe cumplir con la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que todas las ruedas estén apretadas antes de usar.
3. Compruebe si el botón de ajuste de altura está seguro.
4. Asegúrese de que su andador esté en su lugar. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador.
5. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
6. Los frenos deben estar en posición bloqueada antes de sentarse en el asiento.
7. Los frenos se utilizan para evitar que las ruedas rueden. Sin embargo, si alguien lo empuja, es posible que no impida que el andador se mueva.
8. N O empuje su andador mientras está sentado. Walker lo hizo a propósito.
9. NO _ utilice un andador para retroceder, bajar pendientes, subir escaleras, bordillos o cruzar obstáculos grandes. Puede haber un riesgo grave de caída o lesión.
10. NO _ Utilice asientos para transportar personas u objetos de gran tamaño.
11. NO _ siéntese en su asiento cuando el andador esté inclinado.
12. NO _ Empuje el andador cuando el freno esté puesto.
13. NO _ Pon tus manos en los pliegues del andador para evitar que te pillen.
14. NO _ Permítase caer sobre el asiento del andador, pero siéntese siempre lentamente en el asiento de manera controlada.

COMPONENTES



1. Empuñaduras
2. Bloqueo del freno de mano
3. Tornillo
4. Asiento
5. Rueda trasera
6. Respaldo acolchado
7. Cable de freno
8. Bolsa de almacenamiento
9. Rueda universal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho del andador	53.5 CM
Longitud del andador	76.4 CM
Altura del asiento	50 CM
Ancho del asiento	26 CM
Longitud del asiento	49.5 CM
Altura máxima ajustada	88 CM
Altura mínima ajustada	78 CM
Máx. peso del usuario	136.2 KG
Peso andadera	8.2 KG
Rueda delantera	15.2 CM
Rueda trasera	15.2 CM

MANUAL


El andador requiere montaje antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:




Unfold the main frame



.Insert the rear wheels into the main frame(noted that the wheels mustbe facing outward)

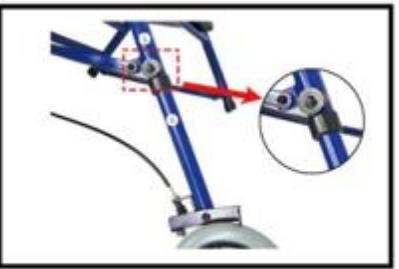


Insert scrow to the hole and install the gasket

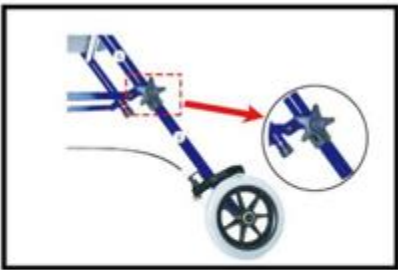

Use rotating nut to screw it tight



This part shall be facing outward,insert the front wheels to main frame

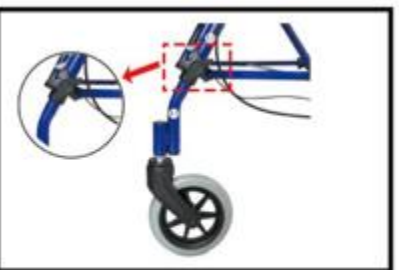

.Screw it tight



.Insert the adjustable handle into main frame (note that the brake lines correspond tothe left and right)



.Screw it tight



Using the cable clip to fix the cable properly



Place the back into the main frame




Press button and insert into the frame



.Completion

¿CÓMO AJUSTAR LA ALTURA?

Gire el tornillo y sáquelo, ajústelo a la altura correcta y bloquee la posición del orificio.

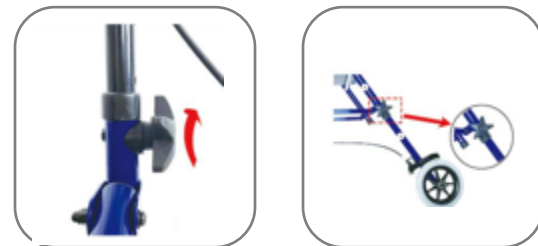

PLEGABLE EL ANDADOR

Para plegar un andador, simplemente levante las barras transversales a cada lado




1. Pull it up from the middle, then you can fold it

OPERANDO EL MANO FRENOS

Freno de mano: Mantenga presionado el freno de mano para reducir la velocidad o detener el andador.

Frenos fijos: tire de los frenos hacia afuera hasta que hagan "clic" para bloquear el andador en posición para bloquear la rueda trasera.

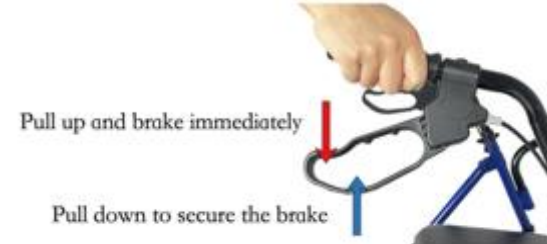

MANTENIMIENTO

Con el tiempo, los cables de freno pueden estirarse y, si no se pueden realizar más ajustes, se deben reemplazar.

Busque la ayuda de su proveedor a la hora de sustituir los cables de freno.

Se debe comprobar que las ruedas estén seguras cada vez antes de utilizar el andador.

Además, verifique que los frenos funcionen correctamente y que las manijas y perillas estén seguras.

Si alguna parte del andador parece floja o insegura, suspenda su uso hasta que sea inspeccionada por un distribuidor autorizado.

A continuación se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Checar que los frenos funcionen de manera adecuada.
- Checar que los tornillos estén ajustados

PERIODICAMENTE

- Checar las llantas
- Checar que todas las piezas estén ajustadas.



MANUAL

ANUAL

- Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

Su andador se puede limpiar con un paño o esponja húmedo y agua tibia y jabón. Si es necesario, se pueden utilizar limpiadores de superficies antibacterianos domésticos. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las empuñaduras o en el asiento, lo que podría dejarlos resbaladizos durante su uso. No utilice estropajos ni raspadores, ya que esto puede dañar los revestimientos de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Límite máximo de trabajo 300 LBS.
2. No se pare sobre el producto
3. Asegúrese de que ambos brazos estén ajustados a misma altura.
4. Consulte a un profesional sanitario capacitado o a un distribuidor sanitario independiente aprobado para ajustar la altura de este producto.
5. Mantener una distancia de seguridad entre peatones u objetos.
6. Algunas piezas pueden causar lesiones o daños cuando entran en contacto con otros objetos.
7. No intente cambiar las ruedas o ruedas de tu bicicleta. Si están defectuosos o necesitan ser reemplazados, comuníquese con un técnico autorizado.
8. Asegúrese de que el andador esté completamente abierto (las barras plegables de ambos lados estén reabiertas antes de usarlo).
9. Al plegar, mantenga los dedos alejados de la barra de plegado.
10. Asegúrese de que los frenos funcionen correctamente antes de usarlos.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su andador Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar
www.andafacil.com/calificar



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.