

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

ANDADOR ANDAFACIL EXTRA FUERTE



Andafacil[®]

www.andafacil.com

ANDADOR ANDAFACIL EXTRA FUERTE

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de usar el andador, asegúrese de que esté completamente extendido y que las cuatro patas estén al mismo nivel.
- No exceda la capacidad máxima de peso (149 KG)
- No se suba al andador.

DESCRIPCIÓN ANDADOR

Diseño plegable con un solo toque, fortalece la capacidad de carga del marco, es liviano y duradero.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: aleación de aluminio
Empuñadura: PVC

PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de que todas las partes del andador estén intactas y, si es necesario, ajuste la altura adecuada para el usuario con la ayuda de un familiar o una enfermera especializada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


1. Para garantizar su seguridad mientras utiliza el andador, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que las cuatro patas estén fijadas al mismo nivel.
3. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador. Úselo en terreno plano.
4. No coloque las manos sobre los pliegues del andador para evitar lesiones.

COMPONENTE



1. Empuñadura cómoda
2. Botón plegable
3. Pata ajustable de 8 velocidades

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

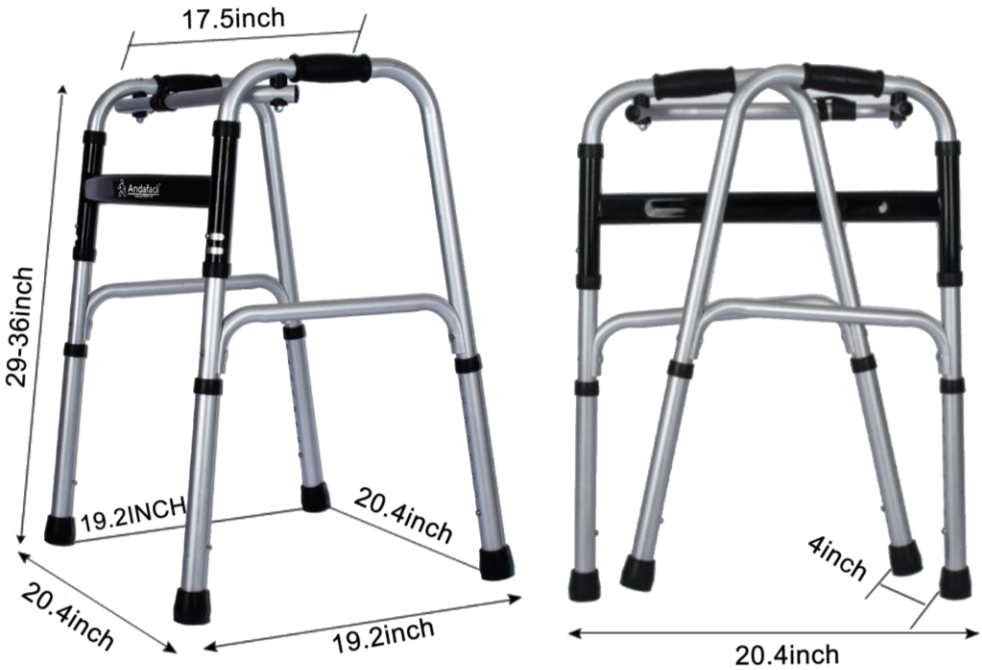

Longitud del andador: 67.8 CM
Ancho del andador : 61 CM
Altura total : 83.8 a 93 CM
Máx. Peso del usuario : 149 KG
Peso : 2.2 KG


ANDADOR ANDAFACIL EXTRA FUERTE

Es necesario extender el andador antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque el armazón del andador y sus accesorios.



MONTAR EL andador

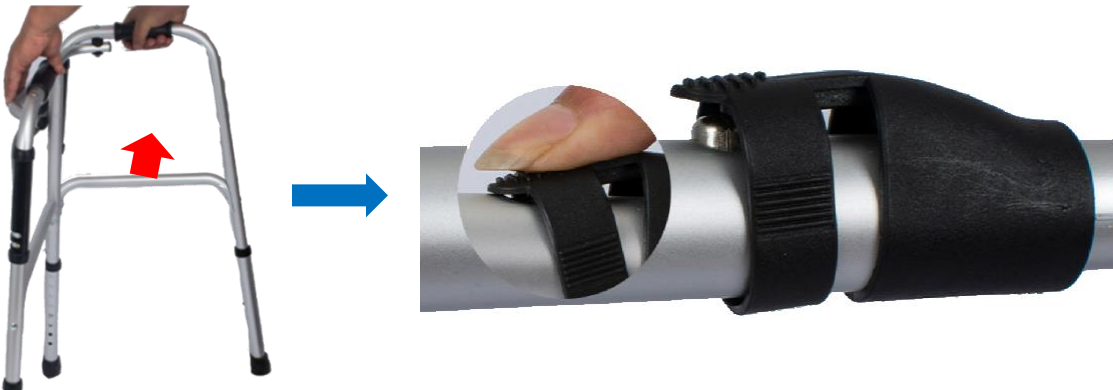

Presione el botón del resorte mientras se estira para desplegar el andador en ambas direcciones.



Para guardarlo, simplemente invierta las instrucciones. Presione el botón de cuentas de resorte para doblar en el centro y completar el almacenamiento plegado.

ANDADOR ANDAFACIL EXTRA FUERTE

PLEGABLE EL ANDADOR



Presione el botón del cordón de resorte y simultáneamente encoja los marcos laterales izquierdo y derecho hacia el centro para completar el almacenamiento plegado.



MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna parte del andador está suelta o no está segura, deje de usarlo y llévelo a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección.

A continuación, se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Revise todo el marco en busca de pernos, tuercas y perillas flojos.

PERIODICAMENTE

- Compruebe si hay desgaste en la empuñadura
- Verifique que los pernos del marco estén seguros
- Verifique que los pernos del eje delantero y trasero estén seguros

ANUAL

Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

El andador se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas o el asiento, ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIA!

1. Debe estar acompañado cuando utilice el andador por primera vez.
2. No se pare ni pise el marco del andador.
5. No apoye su cuerpo sobre el andador para evitar que el centro de gravedad cambie y se dé vuelta.
6. No subas.
8. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar el andador.
9. Compruebe con frecuencia los distintos tornillos de fijación del andador. Si está flojo, ajuste la cerradura a tiempo.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su andador Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar
www.andafacil.com/calificar



Andafacil®
www.andafacil.com

Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.