

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

Andadera Ortopédica con Asiento 2 en 1
Andafacil | Andadera y Silla de Baño



Andafacil[®]

www.andafacil.com

Andadera Ortopédica con Asiento 2 en 1 Andafacil | Andadera y Silla de Baño

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de usar el andador, asegúrese de que esté completamente extendido y que las cuatro patas estén al mismo nivel.
- No exceda la capacidad máxima de peso (150 KG).
- No se suba al andador.
- Asegúrese de que la tabla del asiento esté fija antes de sentarse.

DESCRIPCIÓN ANDADOR

Con una tabla para sentarse, no solo puede ayudar a caminar, sino que también puede sentarse y descansar. Diseño plegable con un solo toque, marco reforzado que soporta carga, ligero y duradero.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: aleación de aluminio
Empuñadura: PVC
Asiento:Plástico


PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de que todas las partes del andador estén intactas y, si es necesario, ajuste la altura adecuada para el usuario con la ayuda de un familiar o una enfermera especializada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras utiliza el andador, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que las cuatro patas estén fijadas al mismo nivel.
3. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador. Úselo en terreno plano.
4. No coloque las manos sobre los pliegues del andador para evitar lesiones.
5. Asegúrese de que la tabla del asiento esté fija antes de sentarse.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

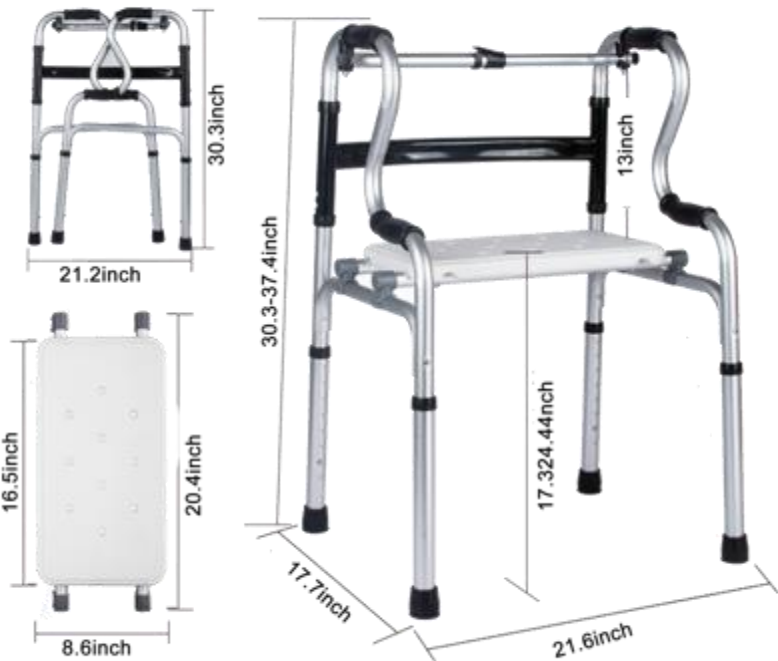

Longitud del andador: 67.8 CM
Ancho del andador : 61 CM
Altura total : 77 a 95 CM
Máx. Peso del usuario : 150 KG
Peso : 4.9 KG



Andafacil®
www.andafacil.com

COMPONENTES




1. Empuñadura cómoda
2. Botón plegable
3. Pata ajustable de 8 velocidades
4. Asiento

Andadera Ortopédica con Asiento 2 en 1 Andafacil | Andadera y Silla de Baño

Es necesario extender el andador antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque el armazón del andador y sus accesorios.

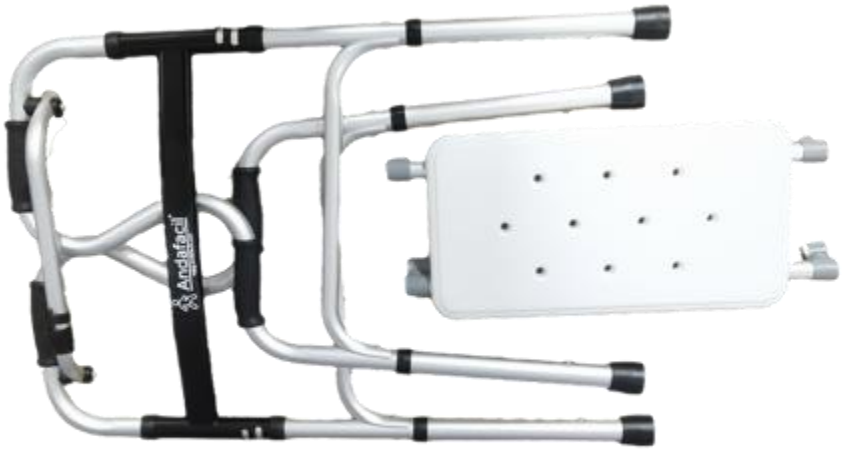

MONTAR EL andador



Presione el botón del resorte mientras se estira para desplegar el andador en ambas direcciones.




Una vez completamente desplegado, puede comenzar a instalar los paneles del asiento.

INSTALACIÓN DE LA PLACA DEL ASIENTO

Saque la placa del asiento y colóquela a ambos lados de la barra transversal del andador, ajuste la dirección de los clips y presione hacia abajo para completar la instalación de la placa del asiento.

Preste atención a la posición delantera y trasera de la placa del asiento e instálela correctamente para que pueda levantarse.

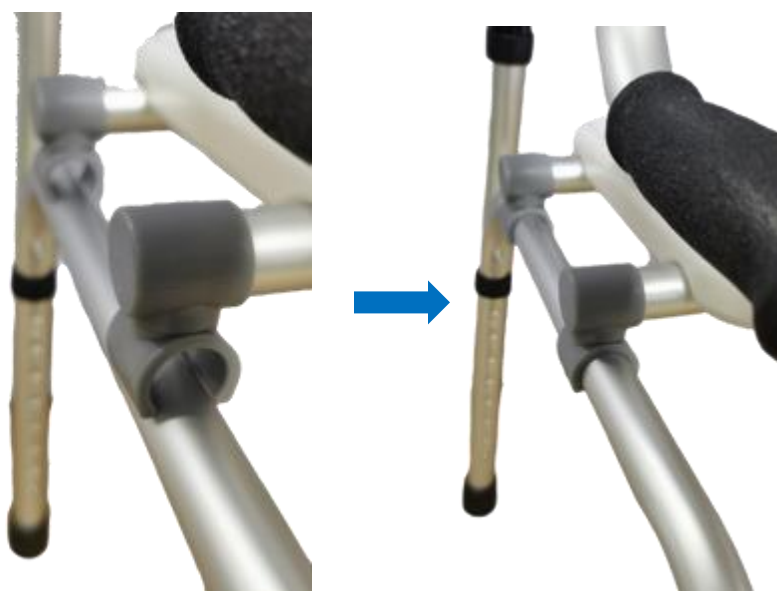

MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna parte del andador está suelta o no está segura, deje de usarlo y llévelo a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección.

A continuación, se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Revise todo el marco y la rueda para ver si hay pernos, tuercas y perillas flojos.

PERIODICAMENTE

- Compruebe si hay desgaste en la empuñadura
- Verifique que los pernos del marco estén seguros
- Asegúrese de que no haya grietas en la tabla para sentarse.

ANUAL

Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

El andador se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas o el asiento, ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Debe estar acompañado cuando utilice el andador por primera vez.
2. No se pare ni pise el marco del andador.
5. No apoye su cuerpo sobre el andador para evitar que el centro de gravedad cambie y se dé vuelta.
6. No subas.
8. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar el andador.
9. Compruebe con frecuencia los distintos tornillos de fijación del andador. Si está flojo, ajuste la cerradura a tiempo.



Andafacil
www.andafacil.com

FUNCION ADICIONAL

01

Fixed use (the marbles are on top)



— Lift forward —

— Put down and take a step —

— Stop and stand —

02

Interactive use (button at the bottom)



— Lift forward —

— Left hand push forward —

— right hand push forward —

Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su andador Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar
www.andafacil.com/calificar



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.