

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

ANDADOR VERTICAL PLEGABLE
ANDAFACIL



Andafacil[®]

www.andafacil.com

ANDADOR VERTICAL PLEGABLE ANDAFACIL



COMPONENTE

1. Cómodo reposabrazos

2. Empuñadura

3. Botón plegable

4. Cómodo asiento acolchado suave.

5 . Pata ajustable de 7 alturas

6. Ruedas
- Longitud del andador: 67.8 CM

ancho del andador : 61 CM

Altura total : 83.8 a 93 CM

Máx. Peso del usuario : 150 KG

Peso : 4.9 KG

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de sentarse en el asiento, se debe colocar el andador sobre suelo sólido .
- No exceda la capacidad máxima de peso (150 KG.)
- No te subas al andador

DESCRIPCIÓN ANDADERA

Desarrollado para personas con lesiones de columna que repercuten en la movilidad, con un par de ruedas. Apoya el movimiento hacia adelante aliviando la presión sobre la columna con soportes para los brazos. También proporciona un cómodo cojín para que el paciente descanse.

MATERIAL COMPONENTES

Marco : aleación de aluminio
Empuñadura: PVC
Asiento:Plástico

PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de que todas las partes del andador estén intactas y, si es necesario, ajuste la altura adecuada para el usuario con la ayuda de un familiar o una enfermera especializada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras usa el andador, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que todas las ruedas estén apretadas antes de usar.
3. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador.
4. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
5. NO mueva el andador cuando la persona esté a punto de sentarse. Mantenga estable el andador antes de sentarse.
6. NO utilice un andador para cargar objetos pesados.
7. NO ponga la mano en el pliegue del andador para evitar que lo pillen.
8. NO se permita caer en el asiento del andador, sino siéntese siempre lentamente en el asiento de manera controlada.



ANDADOR VERTICAL PLEGABLE ANDAFACIL

Es necesario extender el andador antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque el andador y sus accesorios. 2*Reposabrazos, 4*Patas de apoyo regulares adicionales, 2*Patas de apoyo con ruedas. 1 * asiento y tornillos.



MONTAR EL ANDADOR



Estiramiento para desplegar el andador en ambas direcciones para extender el marco principal.

Instalación de tubos de patas delanteras con ruedas (ruedas hacia afuera)

Tome uno de los reposabrazos , presione el resorte y los accesorios e insértelo en el orificio superior. Preste atención a la orientación del reposabrazos, la empuñadura debe mirar hacia afuera.



Ajuste la dirección de los clips y presione hacia abajo para completar la instalación de la placa del asiento.

Preste atención a la placa del asiento e instálela correctamente para que pueda levantarse.

Aloje el tornillo, presione la cuenta con resorte, ajuste la empuñadura a la posición adecuada y apriete el tornillo de la perilla.

Todos los botones de cuentas de resorte deben quedar expuestos a los orificios cuando se presionan hacia abajo, y se requiere fuerza para hacer que el accesorio se ajuste al marco principal al mismo tiempo.

ANDADOR VERTICAL PLEGABLE ANDAFACIL

MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna parte del andador está suelta o no está segura, deje de usarlo y llévelo a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección.

A continuación, se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Revise todo el marco y la rueda para ver si hay pernos, tuercas y perillas flojos.

PERIODICAMENTE

- Compruebe si hay desgaste en la empuñadura
- Verifique que los pernos del marco estén seguros
- Asegúrese de que no haya grietas en la tabla para sentarse.

ANUAL


Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

El andador se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas o el asiento, ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Debe estar acompañado cuando utilice el andador por primera vez.
2. No se pare ni pise el marco del andador.
5. No apoye su cuerpo sobre el andador para evitar que el centro de gravedad cambie y se dé vuelta.
6. No subas.
8. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar el andador.
9. Compruebe con frecuencia los distintos tornillos de fijación del andador. Si está flojo, ajuste la cerradura a tiempo.

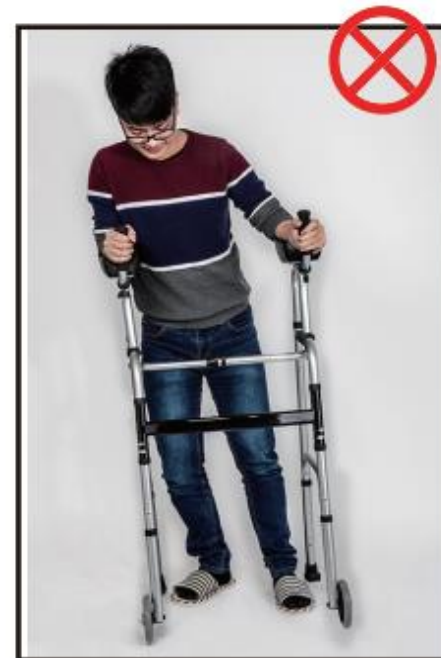

No desplaces el centro de gravedad



Subida nunca asistida



No empujes hacia atrás

Uso con reposabrazos



Uso sin reposabrazos



Gracias por su compra.
Esperamos que disfrutes de tu andador Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar
www.andafacil.com/calificar



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.