

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

Andafacil Barra de Apoyo para Cama para Adulto Mayor



Andafacil[®]

www.andafacil.com

Andafacil Barra de Apoyo para Cama para Adulto Mayor

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de usar el pasamanos, asegúrese de que estén instalados los tornillos correctos para fijarlo en su lugar.
- No exceda la capacidad de carga máxima (330 libras).
- No presione para evitar que se vuelque si la persona no está en la cama.

DESCRIPCIÓN PRETIL

El pasamano está hecho de aleación de aluminio de alta calidad, es liviano, tiene buena tenacidad y no es fácil de oxidar . Cómodo para que las personas mayores se levanten, adecuado para un uso frecuente a largo plazo.

MATERIAL
COMPONENTES

Marco: aleación de aluminio
Bolsa de almacenamiento: nailon
Empuñadura: Espuma


PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de que todas las partes del pasamanos estén intactas y completamente insertadas entre el colchón y la tabla de la cama.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras usa el pasamanos , debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. comprobar Se instalan tornillos para bloquearlo en su lugar.
3. No coloques las manos debajo del soporte para evitar lesiones.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

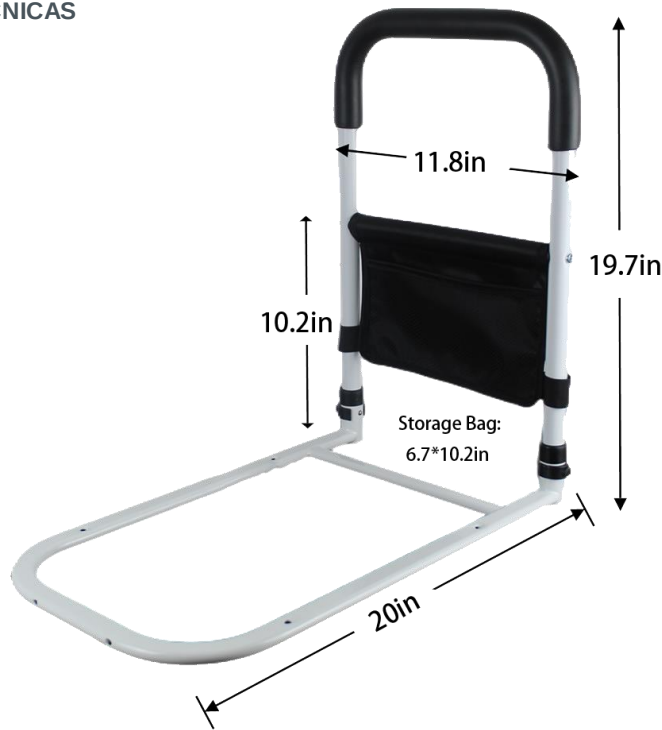

Longitud del soporte de la base:
20 pulgadas
Altura total: 19,7 pulgadas
Bolsa de almacenamiento:
6,7*10,2 pulgadas
Máx. Carga: 330 libras
Peso : 3,6 libras

COMPONENTE




1. Pasamanos cómodo
2. Bolsa de almacenamiento
3. Marco fuerte


Andafacil Barra de Apoyo para Cama para Adulto Mayor

El pasamano requiere instalación antes de su uso. Por favor, siga las siguientes instrucciones:

1. Saque el marco de la barandilla y sus accesorios.

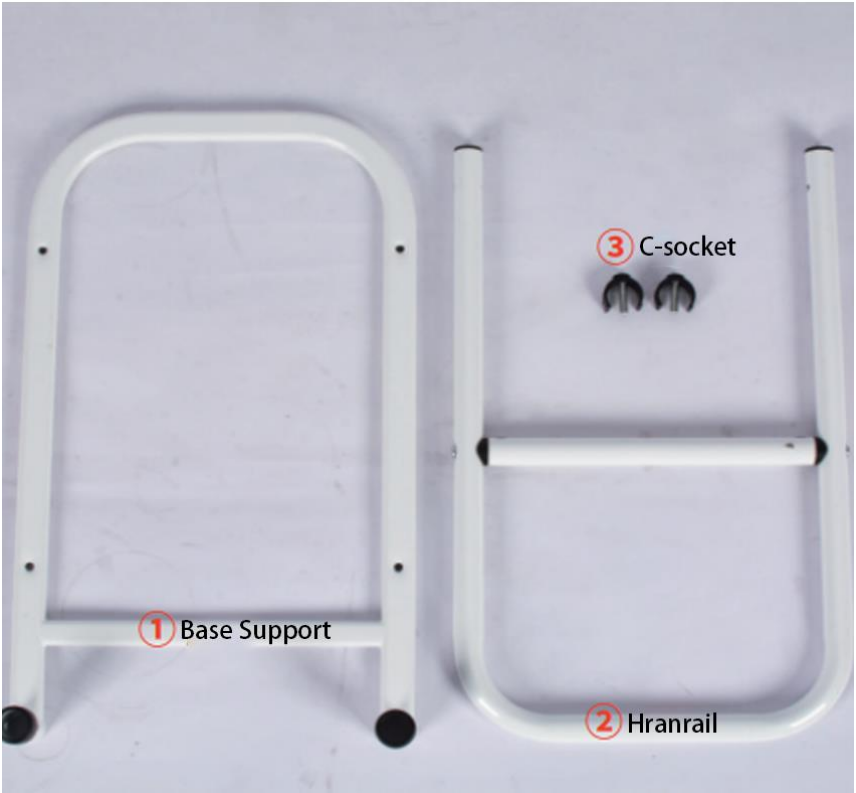

MONTAR EL PASAMANOS-1

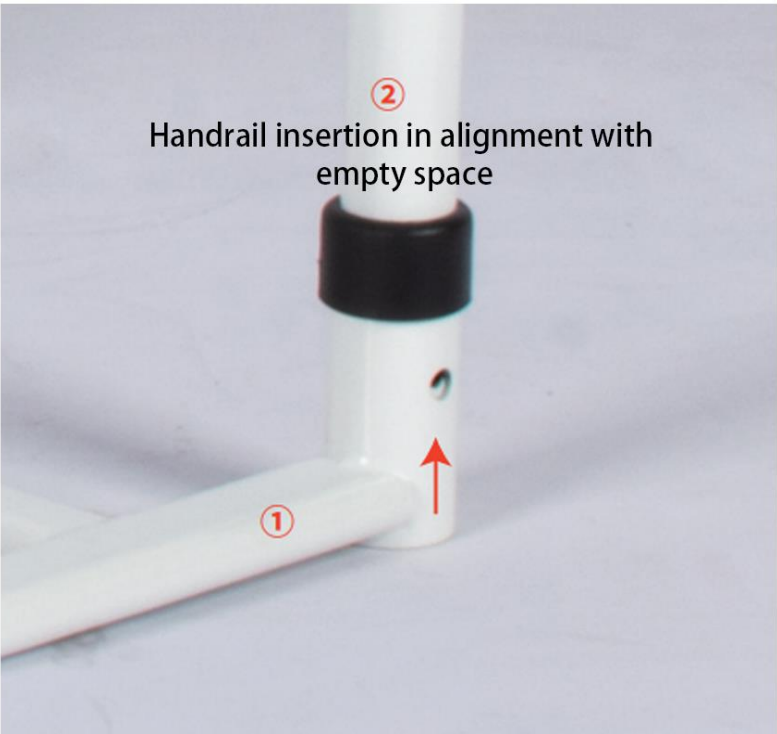

Coloque la base plana y levante los reposabrazos. Inserción del pasamanos alineado con el espacio vacío.

MONTAR EL PASAMANOS-2

Andafacil Barra de Apoyo para Cama para Adulto Mayor



Después de bloquear el zócalo C, el conjunto del reposabrazos está completo

Insértelo entre la tabla y el colchón y luego use un destornillador para fijar los tornillos de forma segura.

En este paso, los pasos de instalación están completos y puede usarlo normalmente.

MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna parte del pasamano está suelta o no está segura, deje de usarlo y llévelo a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección.

A continuación se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Revise todo el marco en busca de pernos, tuercas y perillas flojos.

PERIODICAMENTE

- Verifique que el conector C esté seguro.
- Verifique que los pernos del marco de soporte base estén seguros

LIMPIEZA

El pasamano se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas o el asiento, ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIA!

1. Deberá estar acompañado cuando utilice el pasamano por primera vez.
2. No se pare ni pise el marco del pasamanos.
5. No apoye la espalda en el pasamanos para evitar que el centro de gravedad cambie y se vuelque.
6. No subas.
8. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar el pasamanos .
9. Revisar siempre los tornillos de sujeción y las soldaduras del pasamano. Si están flojos llévalos a una estación de servicio.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrutes de tu Barandilla de Cama Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar www.andafacil.com/review



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.



Andafacil[®]
www.andafacil.com