

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

ANDADOR DE REHABILITACIÓN ANDAFACIL



Andafacil[®]

www.andafacil.com

INGLÉS (AMERICA DEL NORTE)

ANDADOR DE REHABILITACIÓN ANDAFACIL



COMPONENTE

- 1. Almohadillas de espuma para el cuerpo
- 2. Freno de mano
- 3. Polo de infusión
- 4. Tablero del asiento
- 5. Tablero de soporte del asiento
- 6. rodillera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño	105*88-114-145CM	41,3*34,6*44,8-57 pulgadas
Ancho del pecho	30-43CM	11,8-17 pulgadas
Profundidad del pecho	43CM	17 pulgadas
Altura adecuada	150-180CM	4'11"-5'11"
Peso	40,5 libras	18,4 kg
Máx. peso del usuario	220 libras	100 kg

ADVERTENCIAS

Verifique visualmente la integridad del producto antes de usarlo. Si hay alguna anomalía con el producto, comuníquese con nosotros de inmediato ya que no estaremos obligados a asumir ninguna responsabilidad por el mal uso del equipo.

- Antes de sentarse en el asiento, se debe colocar el andador sobre suelo sólido .
- No exceda la capacidad máxima de peso (22 0 lbs.)

DESCRIPCIÓN ANDADOR

Desarrollado para personas con lesiones de columna que repercuten en la movilidad, con un par de ruedas. Apoya el movimiento hacia adelante aliviando la presión sobre la columna con soportes para los brazos. También proporciona un cómodo cojín para que el paciente descanse.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: aleación de aluminio
Empuñadura: PVC
Asiento:Plástico

PREPARANDO PARA USAR

Asegúrese de que todas las partes del andador estén intactas y, si es necesario, ajuste la altura adecuada para el usuario con la ayuda de un familiar o una enfermera especializada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras usa el andador, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que todas las ruedas estén apretadas antes de usar.
3. Sea consciente de su entorno cuando utilice un andador.
4. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
5. No mueva el andador cuando la persona esté a punto de sentarse. Mantenga estable el andador antes de sentarse.
6. NO utilice un andador para cargar objetos pesados.
7. NO ponga la mano en el pliegue del andador para evitar que lo pillen.
8. NO se permita caer en el asiento del andador, sino siéntese siempre lentamente en el asiento de manera controlada.



ANDADOR DE REHABILITACIÓN ANDAFACIL
MONTAR EL ANDADOR

Es necesario extender el andador antes de su uso. Por favor, siga las siguientes

- instrucciones:
1. Saca todos los accesorios.




1. Saque el marco de soporte inferior.



2. Instalación Tubo de equilibrio fijo




3. Fije el soporte superior al soporte inferior.

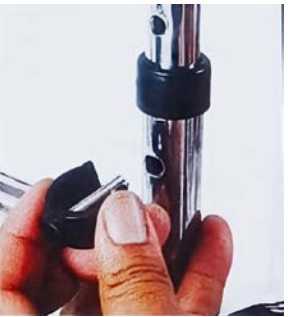


4. Utilice hebillas para asegurar los soportes superior e inferior.



5. Ortesis bilateral para axila ajustable y fija

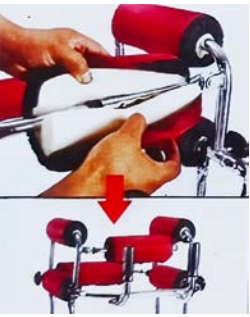

6. Instale almohadillas de esponja

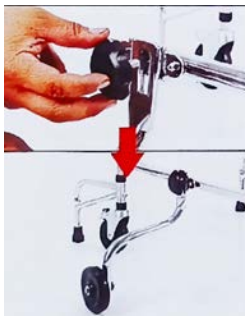

7. Instale ruedas antivuelco en ambos lados.



8.Utilice hebillas para instalar los cojines protectores del asiento.



9.Instale la hebilla en la barra transversal del soporte inferior, luego coloque la placa de rodilla en la hebilla y luego use los tornillos para bloquearla y completarla.



10. Correas para las piernas instaladas en la rodillera.



11. Utilice hebillas para instalar el asiento de apoyo para mujeres.



12. Utilice hebillas para instalar el asiento de apoyo para hombres.

ANDADOR DE REHABILITACIÓN ANDAFACIL

MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna parte del andador está suelta o no está segura, deje de usarlo y llévelo a uno de nuestros centros oficiales de posventa para su inspección.

A continuación se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Revise todo el marco y la rueda para ver si hay pernos, tuercas y perillas flojos.

PERIODICAMENTE

- Compruebe si hay desgaste en la empuñadura
- Verifique que los pernos del marco estén seguros
- Asegúrese de que no haya grietas en la tabla para sentarse.

ANUAL




Una vez al año lleve su andador a un reparador autorizado para una revisión completa, limpieza, servicio y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

El andador se puede limpiar con un paño húmedo o una esponja y agua tibia y jabón. Si es necesario, se puede utilizar un limpiador de superficies antibacteriano doméstico. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las manijas o el asiento, ya que esto puede hacerlo resbaladizo durante el uso. No utilice almohadillas de limpieza ni raspadores, ya que esto puede dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Debe estar acompañado cuando utilice el andador por primera vez.
2. No se pare ni pise el marco del andador.
5. No apoye su cuerpo sobre el rolador para evitar que el centro de gravedad cambie y se dé vuelta.
6. No subas.
8. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar el andador.
9. Compruebe con frecuencia los distintos tornillos de fijación del andador. Si está flojo, ajuste la cerradura a tiempo.

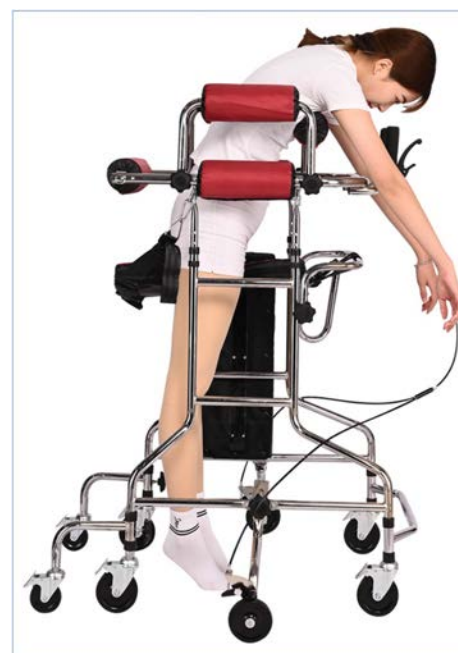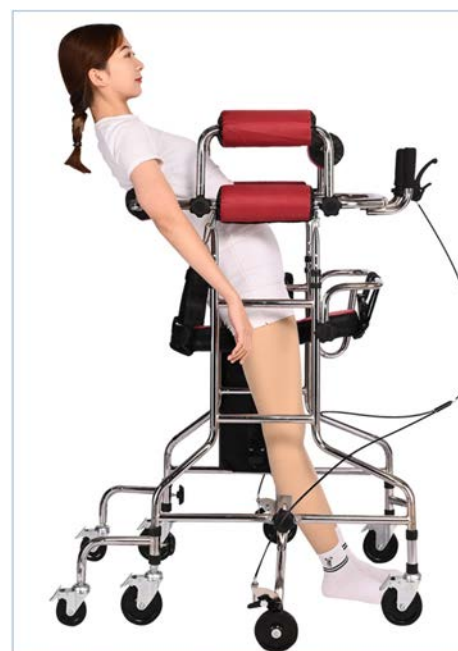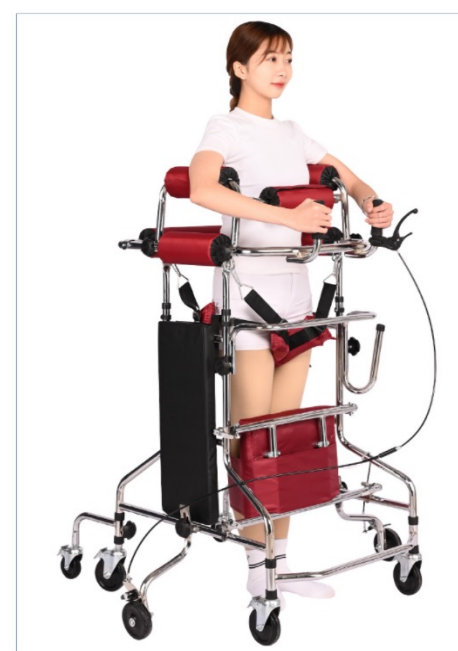

**Gracias por su compra.
Esperamos que disfrutes de tu andador Andafacil.**

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review

Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.

