

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

Muletas plegables para adultos Andafacil



ANDAFACIL[®]
www.andafacil.com

Andafacil Muleta plegable

ADVERTENCIAS

Antes de realizar cualquier operación, compruebe visualmente la integridad del dispositivo. Si el producto presenta alguna anomalía, contacte inmediatamente con el distribuidor donde lo adquirió. No nos responsabilizamos del mal uso del dispositivo.

DESCRIPCIÓN MULETAS

La muleta presenta un diseño plegable, marco de aleación de aluminio y ajuste de múltiples engranajes, peso liviano, alta capacidad de carga, adecuada para ancianos y discapacitados, etc., se puede desmontar y plegar, lo que es conveniente para transportar.

MATERIAL COMPONENTES

Marco: aleación de aluminio
Soporte para axilas: Soporte suave de TPR

PREPARANTE PARA USAR


La elección del tipo de ayuda y de los ajustes necesarios para su utilización deberá ser realizada por personal médico y técnico cualificado, en función de la patología y condiciones del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1. Para garantizar su seguridad al utilizar la muleta, debe cumplir con la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
- 2. Compruebe si el botón de ajuste de altura está seguro.
- 3. Asegúrese de que su muleta esté en su lugar. Tenga en cuenta su entorno cuando utilice una muleta.
- 4. NO coloque las manos sobre el pliegue de la muleta para evitar que queden atrapadas.
- 5. Asegúrese de que las canicas de cada pieza de ajuste sobresalgan completamente de los orificios.

USUARIO
MANUAL

COMPONENTE

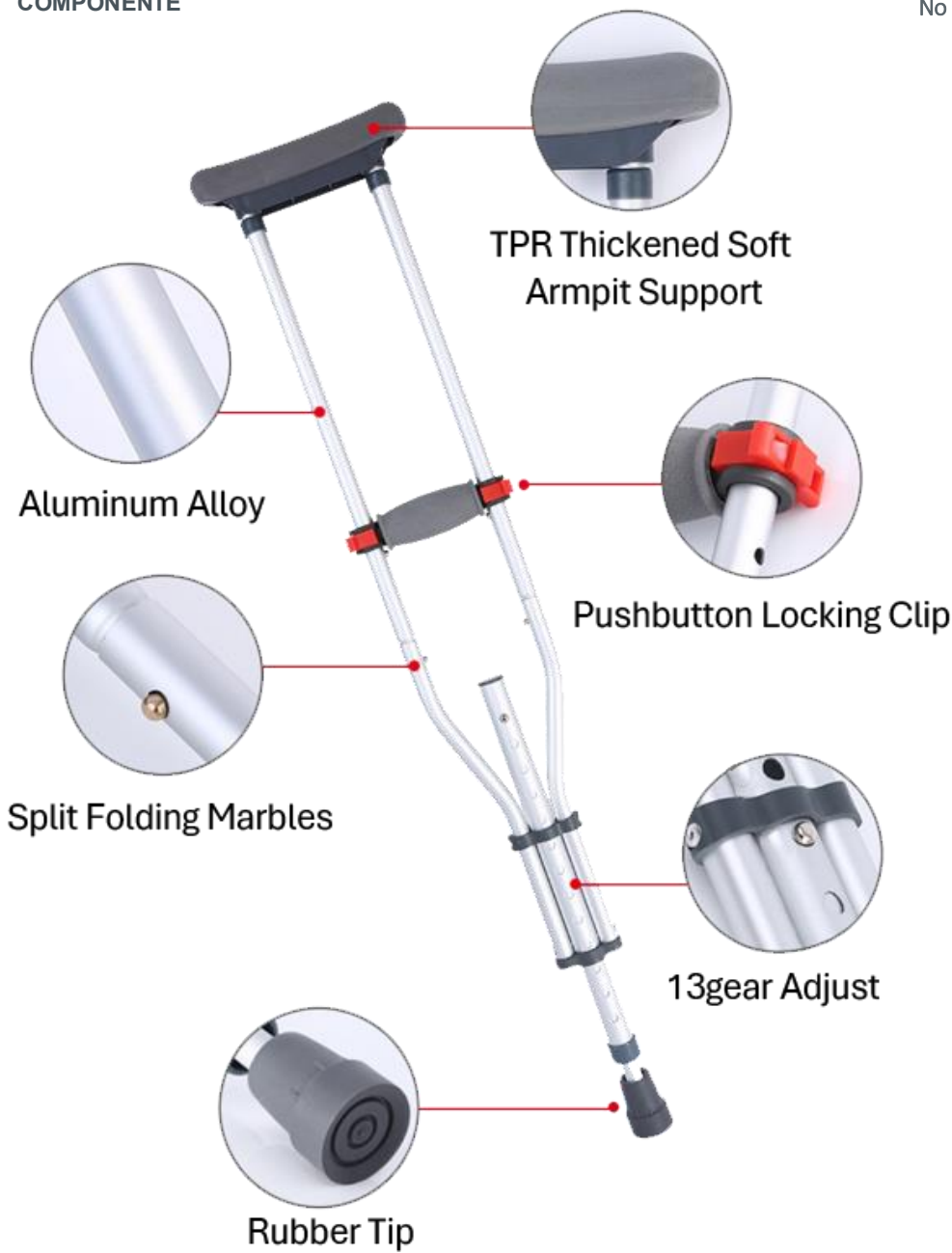

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	127.5 a 165.8 cm (50.2 a 65.3 pulgadas)
Ancho de la muleta	20 cm (8 pulgadas)
Ajustar la altura máxima	165.8 cm (65.3 pulgadas)
Ajustar la altura mínima	127.5 cm (50.2 pulgadas)
Peso máximo del usuario	100 kg (220 libras)
Peso	1.5 kg (3.4 libras)

Ortopédica Plegable

No es necesario ensamblar la muleta antes de usarla. Siga las instrucciones a continuación:

1. Sácalo de la caja



MANUAL DE USUARIO

CÓMO MONTAR LA MULETA



Empuja dos canicas hacia abajo y conéctalas a la parte inferior.



Asegúrese de que las canicas de ajuste sobresalgan por los orificios para completar el montaje.



ANDAFACIL[®]
www.andafacil.com

MANTENIMIENTO

Después de un período de tiempo, si alguna parte de la muleta está suelta o no está segura, deje de usarla y llévela a uno de nuestros puntos de posventa oficiales para su inspección.

A continuación se muestra el programa de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Asegúrese de que las canicas de ajuste sobresalgan por los orificios para completar el montaje.

PERIÓDICAMENTE

- Revisar que las agarraderas aun estan fijas
- Revisar que los tornillos esten apretados

Muleta ortopédica plegable Andafacil

LIMPIEZA

Puede limpiar la muleta con un paño o esponja húmedos y agua tibia con jabón. Si es necesario, puede usar limpiadores de superficies antibacterianos domésticos. Tenga cuidado de no dejar residuos de limpieza en las empuñaduras ni el asiento, ya que podrían resbalarse al usarlos. No utilice estropajos ni raspadores, ya que pueden dañar el revestimiento de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Límite máximo de trabajo 100kg.
2. No se apoye en la muleta y levante los pies del suelo.
3. Asegúrese de que ambos putters estén ajustados a la misma altura.
4. Consulte a un profesional de la salud capacitado o a un distribuidor independiente de atención médica autorizado para ajustar la altura de este producto.
5. Mantenga una distancia segura entre peatones y otros peatones u objetos.
6. Algunas piezas pueden causar lesiones o daños al entrar en contacto con otros objetos.
7. Asegúrese de que la muleta esté completamente abierta antes de usarla.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su Andador Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar
www.andafacil.com/review



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o al WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.