

ESPAÑOL (LATINOAMERICA)

Andafacil Silla de Ruedas 3 en 1 para Adulto
Reclinable | Adultos Mayores



Andafacil[®]

www.andafacil.com

Andafacil Silla de Ruedas 3 en 1 para Adulto Reclinable | Adultos Mayores

Antes de realizar cualquier operación, compruebe visualmente la integridad del dispositivo. En caso de que el producto presente anomalías, contactar inmediatamente con el distribuidor donde lo adquirió. No asumimos ninguna responsabilidad por el mal uso del dispositivo.

- La silla de ruedas debe permanecer sobre una superficie sólida antes de sentarse en el asiento.
- No exceda la capacidad máxima de peso (200 libras)
- No se suba a la silla de ruedas

DESCRIPCIÓN SILLA DE RUEDAS

Con freno de mano y diseño plegable compacto, marco estabilizador de acero, seguro y liviano. Adecuado para una amplia gama de terrenos. Reposapiés regulable en altura

COMPONENTES MATERIALES

Marco: acero al carbono
Ruedas: neumáticos macizos que absorben los golpes.
Reposabrazos: Reposabrazos texturizados antideslizantes
Asiento: Cojín de malla transpirable

PREPARACIÓN PARA EL USO

Asegúrese de montar la silla de ruedas correctamente y, si es necesario, solicite la ayuda de un médico o enfermera para ajustar la altura adecuada para el usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para garantizar su seguridad mientras usa la silla de ruedas, debe seguir la siguiente información de seguridad y todas las instrucciones.
2. Verifique que todas las ruedas estén apretadas antes de usar.
3. Compruebe si el freno de mano y el freno de pie funcionan correctamente.
4. Sea consciente de su entorno cuando utilice una silla de ruedas.
5. El propósito del respaldo es brindar apoyo a la espalda al sentarse. El respaldo no está diseñado para soportar todo el peso del cuerpo. Evite inclinarse mientras está sentado, ya que esto puede provocar una caída.
6. Los frenos deben estar en posición bloqueada antes de sentarse en el asiento.
7. Los frenos se utilizan para evitar que las ruedas rueden. Sin embargo, si alguien lo empuja, es posible que esto no impida que la silla de ruedas se mueva.
8. NO mover la silla de ruedas cuando la persona esté a punto de sentarse; Mantenga la silla de ruedas estable antes de sentarse.
9. NO use una silla de ruedas sola para retroceder, bajar pendientes, subir escaleras, bordillos o cruzar obstáculos grandes. Puede haber un riesgo grave de caída o lesión.
10. NO utilice silla de ruedas para transportar objetos pesados.
11. Cuando el andador esté en una pendiente, observe si el freno de pie está activado.
12. NO empuje la silla de ruedas cuando el freno esté puesto.
13. NO ponga la mano en el pliegue de la silla de ruedas para evitar quedar atrapado.
14. NO se deje caer en el asiento de la silla de ruedas, sino siéntese siempre lentamente en el asiento de forma controlada.

COMPONENTE



1. Freno de agarre
2. Reposacabezas
3. Respaldo ajustable hidráulicamente de 90/180°
4. Cómodo reposabrazos
5. Cómodo cojín del asiento
6. Cubo de inodoro
7. Reposapiés de espuma
8. Reposapiés
9. Ruedas traseras de 24 pulgadas
- Ruedas delanteras de 10, 7 pulgadas
11. Freno de mano

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño plegable	38,2*36,2*10,2 pulgadas
Ancho de la silla de ruedas	26,7 pulgadas
Altura de la silla de ruedas	35,44/7,2 pulgadas
Longitud de la silla de ruedas	38,265 pulgadas
Apoyabrazos al suelo	28,3 pulgadas
Ancho del asiento	18 pulgadas
Altura del asiento al Gourd	18,5 pulgadas
Profundidad del asiento	16,5 pulgadas
Altura del cojín del respaldo	16,5 pulgadas
Rueda delantera	7 pulgadas
Rueda trasera	24 pulgadas
Peso máx.	225 kg
peso del usuario	100 kg

MANUAL SILLA DE RUEDAS RECLINABLE ANDAFACIL



MANUAL SILLA DE RUEDAS RECLINABLE ANDAFACIL

FUNCIONAMIENTO DEL FRENO DE PIE

Presione los frenos de pie izquierdo y derecho para bloquear el dispositivo en la rueda trasera, desacelerando o deteniendo la silla de ruedas.

Atención: El freno debe estar bajado en la posición bloqueada cuando esté sentado. Empuje hacia adelante para verificar previamente la cerradura.



PLEGAR LA SILLA DE RUEDAS

Levante los pedales, pliegue el respaldo hacia atrás, cruce las manos, levante el cojín y ciérrelo lentamente, pliegue el cojín.



Presione ambos botones hacia abajo para colapsar la parte posterior.



Una vez plegado el respaldo, levante las correas laterales para plegar la silla de ruedas.

FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS DE MANO

Levante el freno de mano para reducir la velocidad o detener el andador.

Atención: asegúrese de que el freno de pie esté en la posición de freno cuando necesite utilizar la silla de ruedas.



MANTENIMIENTO

Con el tiempo, los cables de freno pueden estirarse y, si no se pueden realizar más ajustes, se deben reemplazar.

Busque la ayuda de su proveedor a la hora de sustituir los cables de freno.

Se debe comprobar que las ruedas estén seguras cada vez antes de utilizar el andador.

Además, verifique que los frenos funcionen correctamente y que las manijas y perillas estén seguras.

Si alguna parte del andador parece floja o insegura, suspenda su uso hasta que sea inspeccionada por un distribuidor autorizado.

A continuación se muestra el cronograma de mantenimiento:

SEMANALMENTE

- Revise el freno para ver si hay mal funcionamiento
- Revise todas las ruedas y pivotes en busca de pernos flojos y tuercas y perillas

PERIODICAMENTE

- Compruebe el desgaste de la empuñadura
- Verifique que los pernos del marco estén seguros
- Verifique que los pernos del eje delantero y trasero estén seguros
- Revise los neumáticos en busca de desgaste o grietas.

ANUAL

- Una vez al año lleve su silla de ruedas a un reparador autorizado para una revisión completa, servicio de limpieza, y lubricación de todas las piezas móviles.

LIMPIEZA

Su silla de ruedas se puede limpiar con un paño o una esponja húmedos y agua tibia y jabón.

Si es necesario, se pueden utilizar limpiadores de superficies antibacterianos domésticos. Se debe tener cuidado de no dejar residuos de limpieza en las empuñaduras o en el asiento, lo que podría dejarlos resbaladizos durante su uso. No utilice estropajos ni raspadores, ya que esto puede dañar los revestimientos de la superficie.

¡ADVERTENCIAS!

1. Deberá estar acompañado cuando utilice o monte una silla de ruedas por primera vez.
2. No se pare ni pise los pedales al sentarse o abandonar la silla de ruedas.
3. Utilice el freno al sentarse o bajarse de la silla de ruedas.
4. En una silla de ruedas, debe mantener el equilibrio de lado a lado con el cuerpo pegado al respaldo de la silla.
5. No incline su cuerpo fuera del automóvil para evitar que el centro de gravedad cambie y se vuelque.
6. No subas solo.
7. Cambiar de dirección al bajar una pendiente hará que la silla de ruedas se vuelva inestable.
8. No utilice sillas de ruedas en caminos con pendientes superiores a 8°.
9. No utilice ácidos, álcalis ni otras sustancias químicas corrosivas para desinfectar las sillas de ruedas.

10. Compruebe con frecuencia los distintos tornillos de fijación de la silla de ruedas. Si está flojo, ajuste la cerradura a tiempo.

Gracias por su compra. Esperamos que disfrutes de tu Silla de Ruedas Andafacil.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte.



Visita la página o escanea el código QR para comenzar www.andafacil.com/review



Envíanos una foto o captura de pantalla de tu reseña a contacto@andafacil.com o WhatsApp +526622389950 y te enviaremos tu regalo.

