



ANDAFACIL[®]

www.andafacil.com

Andafacil[®] Andadera para niños
de altura ajustable



MANUAL DEL USUARIO

MANUAL DE USUARIO

Precaución

Cuando suba o baje escaleras, escalones o escaleras eléctricas, **no use la andadera**. Antes de usarla, asegúrese de que los cuatro tubos de las patas estén en la misma posición de orificio y de que las bolitas de bloqueo salgan correctamente.

Use únicamente nuestros accesorios. El uso de accesorios de otros fabricantes puede resultar en un ajuste inadecuado y riesgo de caída y/o lesión.

Este producto es una andadera tipo de arrastre, con rueda unidireccional: solo puede avanzar, **no retroceder**.



MANUAL DE USUARIO

Método de instalación

Manual de instrucciones

Gracias por usar nuestro producto.

Antes de usarlo, por favor lea el manual cuidadosamente.

Saque todos los artículos del paquete.

(Tubo del marco principal 1 juego, tubo de patas 4 piezas)

Abra primero el marco principal.

Presione el botón azul en la unión de plegado.

El marco principal se abre normalmente, como se muestra en la imagen.

Instalación del tubo de patas:

Saque el tubo de patas correspondiente al número, presione la bolita para introducirlo en la posición adecuada del orificio, y la bolita saldrá correctamente.

Instalación completa.



1. Take all the items out of package.
(Main frame tube 1set, foot tube 4pcs)



2. Open the main frame first.



3. Press down the blue key at
the folding joint.



4. The main frame opens normally
as shown in the picture.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su producto.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte



Visite la página o escanee el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review