



ANDAFACIL[®]

www.andafacil.com

Andafacil[®] EasyTransfer Pro –
Silla Transferencia Eléctrica |
Blanca, Reclinable, 120kg



MANUAL DEL USUARIO

MANUAL DE USUARIO

Parámetros del Producto

Nombre del Producto: Silla de Transferencia Eléctrica

Color del Producto: Blanco

Material del Producto: Tubo de acero engrosado

Características del Producto: Resistente y Duradero

Capacidad Máxima de Carga: 120 kg

Dimensiones de la Apertura del Inodoro: 24 × 21 cm

Adecuado Para: Personas postradas a largo plazo, con molestias en piernas o pies, en recuperación postquirúrgica y personas con movilidad limitada.

Nota: Todas las dimensiones son medidas manualmente y pueden tener una tolerancia de 3 cm. Por favor, consulte el producto real para obtener dimensiones exactas. ¡Gracias por su comprensión!



MANUAL DE USUARIO

Escenarios de Aplicación

Un gran ayudante para el cuidado en el hogar, resolviendo retos de enfermería

Sin necesidad de levantar

Transferencia sin esfuerzo al inodoro

Transferencia sin esfuerzo al inodoro

Sin necesidad de levantar

Transferencia sin esfuerzo al inodoro

Transferencia sin esfuerzo al inodoro

Sin necesidad de levantar

Movimiento fácil en la recámara

Sin necesidad de levantar

Movimiento fácil en la recámara



Instrucciones de Uso

La silla de transferencia eléctrica puede ajustarse a la altura requerida por usuario para satisfacer sus necesidades. el

Asegúrese de que el usuario esté completamente sentado antes de asegurar y usar la silla. Siempre revise que las hebillas estén seguras durante el uso.

Video de instalación:

<https://s.andafacil.com/easytransfer> o escanear el QR



MANUAL DE USUARIO

Precauciones

Antes de usar, asegúrese de que todos los componentes estén completos y firmemente instalados para garantizar la seguridad.

Ajuste la silla a una altura adecuada antes de usar y asegúrese de que ambos asientos estén al mismo nivel.

Al sentarse o levantarse de la silla de transferencia, no se pare sobre el pedal.

Siempre pliegue el pedal y pise el suelo para evitar que la silla se incline.

Asegúrese de que la hebilla de seguridad y el cinturón de seguridad estén bien asegurados al usar la silla.

Al sentarse o levantarse, asegúrese de que las ruedas estén bloqueadas.

Al alcanzar objetos fuera de la silla (ej. al frente, a los lados o atrás), evite inclinarse demasiado para no perder el equilibrio ni volcar la silla.

No se agache por debajo del nivel de las rodillas para recoger objetos del suelo.

Al ajustar la altura del asiento, asegúrese de que las ruedas delanteras estén correctamente posicionadas; ambas manijas deben girarse de forma sincronizada y pareja.

No intente empujar la silla de transferencia por escalones, ya que esto puede causar daños accidentales. No levante al usuario junto con la silla al subir o bajar escaleras, ya que esto puede representar un riesgo.

La silla de transferencia está diseñada para superficies planas. Evite superficies irregulares y obstáculos para prevenir vuelcos.

Al descender una pendiente con inclinación mayor a 5 grados, el operador debe colocarse de espaldas a la silla y descender lentamente asegurando la estabilidad. Si se desciende de frente, el usuario puede inclinarse hacia adelante y caer.

Cuando esté estacionada en una superficie inclinada, asegúrese de que las cuatro ruedas estén bloqueadas.

Los frenos de las cuatro ruedas son solo para estacionar y no están diseñados para frenar o desacelerar mientras está en movimiento.



Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su producto.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte



Visite la página o escanee el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review