



Andafacil® – EasyRide –
Scooter Eléctrico | Plegable,
Compacto y de Alta Calidad



MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO

I . INTRODUCCIÓN

Lea y siga todas las instrucciones, advertencias y notas en este manual antes de intentar operar su scooter eléctrico por primera vez. Si hay algo que no entienda o necesita ayuda adicional para el montaje u operación, comuníquese con su distribuidor autorizado.

La seguridad en el uso del producto depende de que respete las instrucciones, precauciones y advertencias de este manual. No nos hacemos responsables por daños o lesiones ocasionadas por un uso inseguro o por ignorar las indicaciones aquí descritas.

En este manual se utilizan símbolos para identificar advertencias e información importante. Todos son esenciales para su seguridad. Se recomienda encarecidamente leerlos y comprenderlos por completo.

 **ADVERTENCIA:** Ignorar las advertencias puede ocasionar lesiones personales.

 **ATENCIÓN:** Ignorar las precauciones puede ocasionar daños al scooter.

Por su seguridad, asegúrese de leer todas las instrucciones de operación y seguirlas estrictamente cuando utilice el scooter por primera vez.

Cuando entienda cómo operar y mantener el scooter, este producto le brindará servicio confiable y tranquilidad durante años.

Agradecemos sus sugerencias sobre este manual y sus comentarios sobre la seguridad, confiabilidad del producto y servicio de los distribuidores.

II . ESTRUCTURA Y RENDIMIENTO

Este scooter consta principalmente de cuatro partes: cuerpo delantero, cuerpo trasero, asiento y baterías.

El cuerpo delantero incluye el controlador, manubrio y reposapiés.

El cuerpo trasero incluye el motor de tracción, freno y unidad de control electrónico.

La unidad del asiento incluye respaldo, apoyabrazos y cojín.

Controles del manillar

Interruptor de llave: controla la energía de todo el scooter.

Perilla de velocidad: ajusta la velocidad máxima (en sentido horario aumenta, en sentido antihorario disminuye).

Indicador de batería: verde indica carga fuerte, amarillo carga débil, rojo muy baja (requiere recarga).

Botón de luz delantera: enciende y apaga la luz.

Botón de claxon: activa la bocina.

Palanca izquierda: al tirar hacia atrás con la mano izquierda, el scooter retrocede.

Palanca derecha: al tirar hacia atrás con la mano derecha, el scooter avanza.


Freno manual: una palanca amarilla permite cambiar entre modo “conducción eléctrica” y “empuje manual”.

Conducción eléctrica: palanca hacia atrás (“cerrado”), el scooter está en freno y funciona con motor.

Empuje manual: palanca hacia adelante (“abierto”), el scooter se puede empujar, pero no conducir.

 **Prohibido** colocar la palanca en “empuje manual” al bajar pendientes, pues no habrá freno y es peligroso.

MANUAL DE USUARIO

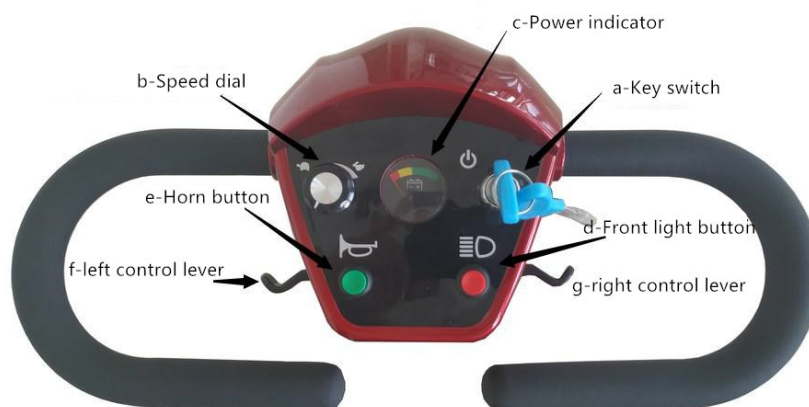

Especificaciones principales

Dimensiones: 1080 × 490 × 940 mm

Batería: 24V 12Ah

Peso: 43 kg

Velocidad máxima: 8 km/h

Freno: electromagnético

Capacidad máxima: 120 kg

Distancia al suelo: 80 mm

Motor: 24V 250W

Controlador: 24V 45A

Cargador: DC24V 2A

Pendiente máxima: 12°

Autonomía: 16 km



Freno manual: una palanca amarilla permite cambiar entre modo “conducción eléctrica” y “empuje manual”.

MANUAL DE USUARIO

III. ENSAMBLAJE

Para facilitar el transporte, el asiento y las baterías vienen separados y deben instalarse en el marco principal.

Abra la caja, retire los protectores y saque el scooter plegado.

Ajuste el ángulo del manillar aflojando la tuerca, levantando al ángulo deseado y fijando de nuevo.

Inserte el soporte del asiento en el tubo trasero, alinee el orificio y coloque el perno.

Coloque el asiento sobre el poste y ajuste la palanca de bloqueo.

Monte los apoyabrazos en los tubos laterales y ajuste el ancho con la perilla.

Monte la canasta si la adquirió como accesorio opcional.

⚠ Asegúrese de que las baterías estén bien colocadas y los electrodos limpios antes de usarlas.



IV. AJUSTES DE CONFORT

⚠ Retire la llave de encendido antes de realizar ajustes.

Altura del asiento: levante la barra de fijación, saque el asiento, ajuste la altura y vuelva a colocar.

Giro del asiento: levante la palanca de bloqueo, gire y suéltela para fijar en la nueva posición.

Ancho de apoyabrazos: afloje los tornillos, ajuste hacia adentro o afuera y vuelva a apretar.

Ángulo del manillar: afloje la perilla inferior, ajuste hacia adelante o atrás y vuelva a fijar.

MANUAL DE USUARIO

V. OPERACIÓN

Conducción

Suba al scooter, coloque la llave y encienda.

Sujete el manubrio con ambas manos y tire suavemente de la palanca derecha para avanzar.

Ajuste la velocidad con la perilla según condiciones del camino.

Para detenerse, suelte la palanca y el scooter frenará automáticamente.

Para retroceder, use la palanca izquierda con precaución.

Carga de la batería

Use únicamente el cargador suministrado.

Conecte el cargador al enchufe de 3 pines.

Luz roja = cargando. Luz verde = casi lleno (mantenga 1–2 h más).

Tiempo recomendado: 10–12 horas.

⚠️ Apague el scooter antes de cargar.

Uso de baterías nuevas

Cargue completamente antes del primer uso.

Tras 4–5 ciclos, alcanzarán 100% de capacidad.

Consola del manillar

Incluye interruptor de llave, perilla de velocidad, palancas de control, indicador de batería, bocina y luz delantera.

⚠️ No use el interruptor de llave como freno de emergencia, salvo en caso extremo.

VI. MANTENIMIENTO

Evite golpes al panel de control.

No exponga el scooter a calor, frío o humedad extremos.

Mantenga limpios conectores y terminales de batería.

Retire la llave tras cada uso.

Si el scooter está inactivo 20 min, se apagará automáticamente.

Revise semanalmente frenos, batería, conexiones, neumáticos y limpieza general.

VII. LIMPIEZA

Controlador: limpie con paño seco y suave.

Motor: limpie la suciedad exterior, no permita entrada de agua.

Carrocería: puede aplicar cera ligera para conservar el brillo.

MANUAL DE USUARIO

VIII. SEGURIDAD

Antes de conducir: revise conexiones eléctricas, frenos y nivel de batería.

Peso máximo: 100 kg. Excederlo anula la garantía y puede causar lesiones.

Pendientes: no suba/baje más de 8°. Siempre en línea recta, nunca en zigzag ni en reversa.

Superficies exteriores: evite pasto alto, grava suelta, arena o superficies inseguras.

Modo manual: no active la palanca de empuje manual en pendientes ni estando sentado.

Interferencias electromagnéticas: evite zonas cercanas a transmisores potentes.

Transferencia al scooter: retire llave, bloquee ruedas delanteras hacia adelante, mueva apoyabrazos si es necesario.

Clima: no lo use bajo lluvia, nieve o en carreteras resbaladizas. No lo exponga a humedad.

Garantía

Para detalles completos de la política de garantía favor de visitar www.andafacil.com

Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su producto.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte



Visite la página o escanee el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review