



ANDAFACIL[®]

www.andafacil.com

Andafacil[®] RehabPro Andadera Vertical para Rehabilitación Avanzada



MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO

EXPLICACIÓN ILUSTRADA DE LA ANDADERA DE ASISTENCIA AL CAMINAR



DIAGRAMA DE ACCESORIOS DE LA ANDADERA DE ASISTENCIA AL CAMINAR

un marco de la andadera



Dos ruedas traseras con frenos



Dos ruedas delanteras universales



una rodaja de soporte de



seis tornillos de perilla



MANUAL DE USUARIO

EXPLICACIÓN ILUSTRADA DE LA ANDADERA DE ASISTENCIA AL CAMINAR

- 1.The forward tilting instability during loading is $> 10^\circ$
- 2.La inestabilidad de inclinación hacia atrás durante la $> 4^\circ$
- 3.The backward and lateral tilting instability during loading is $> 3.5^\circ$
4. Las cuatro ruedas deben tocar el suelo de forma estable y la carga estática de 1500N.
- 5.The safe operating weight is 100KG.
6. El ancho mínimo de conversión es $< 1.2\text{ M}$

2.INSTRUCCIONES DE USO

(La altura y anchura del marco se pueden ajustar según las diferentes formas corporales)



AJUSTE DE ALTURA GENERAL

Presiona los interruptores de los pistones de gas izquierdo y derecho para ajustar la altura hacia arriba y hacia abajo. Suelta los interruptores para fijar la posición. La altura del asiento sobre el suelo: **28-92cm**



ANCHO DELANTERO Y TRASERO DEL CHASIS

Retira los tornillos de perilla de ambos lados, empuja y jala las varillas telescópicas delanteras y traseras para ajustar entre tres velocidades y fíjalas con los tornillos de perilla. El ancho de adelante hacia atrás del chasis: **80-100 cm**



AJUSTE DE ALTURA DEL SOPORTE LUMBAR

Afloja los dos tornillos de perilla frente a la almohadilla de soporte de pecho, y el soporte lumbar se puede ajustar a tres posiciones diferentes hacia arriba y hacia abajo. Luego, aprieta los tornillos de perilla para fijarlo en su lugar. La altura del soporte lumbar desde el asiento: **26-34 cm**



AJUSTE DE ANCHO DE SOPORTE LUMBAR PRO

Afloja los tornillos de perilla en los lados izquierdo y derecho de la almohadilla de soporte de pecho para ajustar el ancho izquierdo y derecho del soporte lumbar.

3.PRECAUCIONES DURANTE EL USO

he use of this product has certain requirements for the environment. (It is suitable for flat ground.) Do not use it on slopes or in the bathroom. When using it, pay attention to the obstacles on the ground to avoid them getting stuck in the wheels. If the obstacles get stuck in the wheels, there is a high possibility of the product tipping over. When used for rehabilitation training, it should be used under the supervision and accompaniment of others. Before use, check whether the screws and casters are loose, and install the protective devices.

4.MÉTODOS DE MANTENIMIENTO

When not in use, please place the product in a dry and ventilated place. Avoid exposing the product to direct sunlight or placing it in a humid environment.

The following points should be noted before and after using the product.



Verifica si el producto product is deformado o agrietado



Verifica si los tornillos de las ruedas delanteras y traseras están apretados



Por favor agrega aceite lubricante regularmente a las ruedas



No lo use it in the bathroom.

INSTALAR LA RUEDA DELANTERA



Alinee con la posición del orificio y gire la rueda en el sentido de las agujas del reloj



Apriete y fije con una llave

INSTALAR LA RUEDA TRASERA

El ancho delantero y trasero se puede ajustar en tres niveles



Pasa una llave por el orificio del tornillo y gírala a la izquierda y derecha para ajustar y alinear las posiciones de los orificios internos y externos



Aprieta y fíjalo con un tornillo de perilla



Mueve el punto central del orificio redondo al borde del plástico

MANUAL DE USUARIO

INSTALAR EL MANUBRIO

Sujeta la hebilla con dos dedos índices y saca las hebillas de ambos lados



Retira el manubrio, gira el agarre hacia arriba y conéctalo al manubrio.

(Nota: Conéctalo en paralelo desde los lados izquierdo y derecho!)



Alinea con las posiciones de los orificios y presiona las hebillas de ambos lados (izquierdo y derecho) para fijarlas



INSTALACIÓN DEL FRENO DE MANO


Use una llave para quitar el tornillo del freno de estacionamiento



Instale el freno de mano debajo del mango



Fije el cable del freno con Velcro

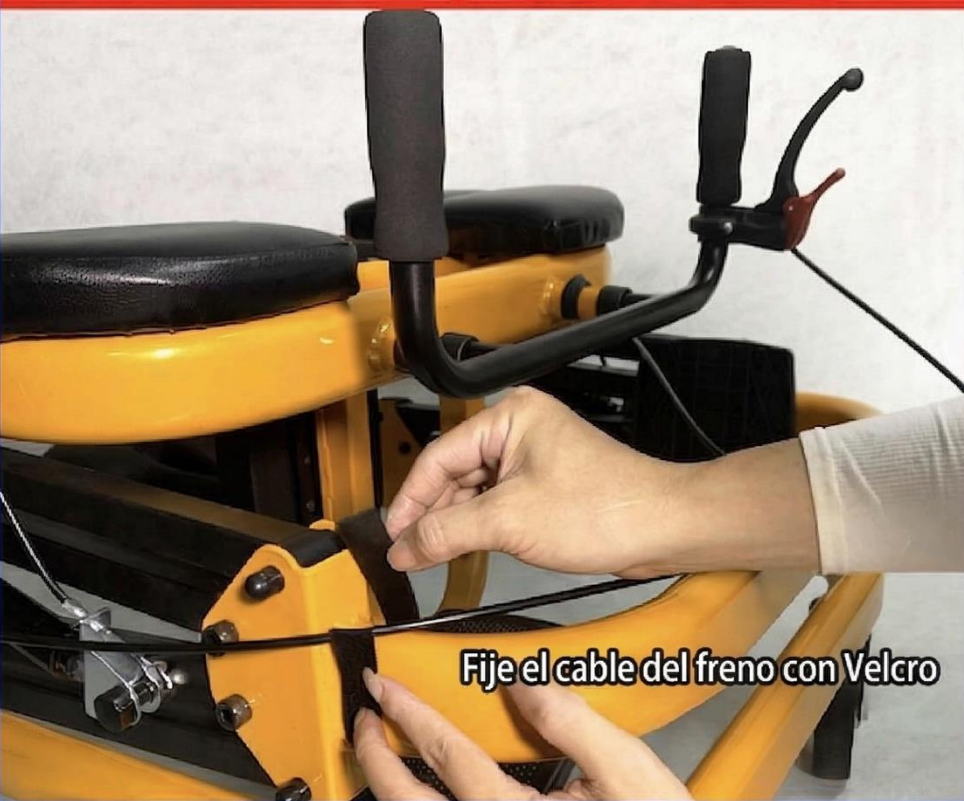

INSTALACIÓN DEL SOPORTE LUMBAR



El soporte lumbar tiene tres configuraciones de altura ajustables

Pase el tornillo de perilla a través del marco



Alinéelo con el orificio del tornillo y apriételo para fijarlo



MANUAL DE USUARIO

AJUSTE DE CORREA DE LA CINTURA



El ancho izquierdo y derecho del soporte lumbar se puede ajustar y fijar apretando el tornillo



En el sentido de las agujas del reloj: apriete;
en el sentido contrario: afloje

INSTALAR EL REPOSAPIÉS

Acople el reposapiés con las barras de soporte izquierda y derecha



Apriete con tornillos moleteados



Hay dos alturas de engranaje disponibles para seleccionar

Levante el interruptor de pasador de posicionamiento



Empuje la varilla retráctil trasera a la posición de engranaje adecuada, y luego suelte el interruptor para fijarlo

Gracias por su compra. Esperamos que disfrute de su producto.

Apóyanos con una calificación en las plataformas y redes y recibirás un regalo especial de nuestra parte



Visite la página o escanee el código QR para comenzar

www.andafacil.com/review